

DRAP DE DESSUS SEMI-AJUSTÉ

MODE D'EMPLOI


Veillez noter qu'il y a deux coutures à chacun des coins inférieurs du drap :

- La première couture est la couture du coin
- La seconde (couture plissée) est créée pour allouer une portion de tissu additionnel pour la zone de confort au pied


INSTRUCTIONS :

- 1- Placer les coutures de coins sur les coins du matelas.

Note : Nous recommandons que les coutures soient placées vers l'extérieur pour éviter d'entrer en contact avec le pied.

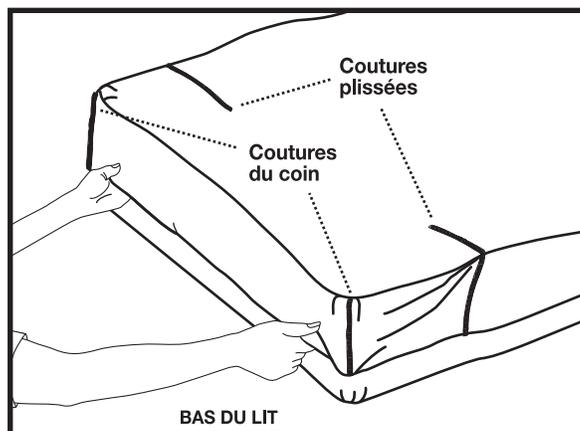

- 2- Tirer la partie supérieure du drap vers la tête du lit en étirant le drap sur sa pleine longueur.

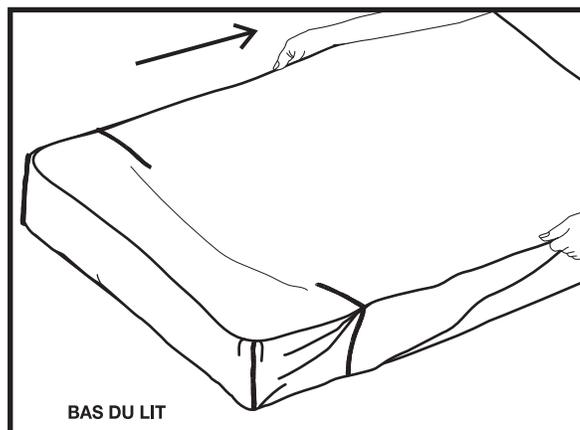

- 3- Retourner au pied du lit et localiser les « coutures plissées ». Prenez ces coutures et ramenez-les vers le pied du lit. Ceci créera une pochette au pied du lit qui permettra aux pieds du patient/résident de rester couverts, mais libre de pression.

Pour une meilleure utilisation, si la personne utilise une couverture, on doit la laisser libre au pied du lit.

