

# Étapes pour mettre un équipement de protection (EPI)



1

## MAINS

- Effectuer une bonne hygiène des mains



3

## MASQUE

- Placer le masque et mouler la barette nasale
- Effectuer un contrôle de l'étanchéité



2a

## BLOUSE

- Mettre la blouse en enfilant les manches



4

## VISIÈRE

- Placer la visière



2b

- D'abord, attacher les cordons à l'arrière du cou



5

## GANTS

- Enfiler les gants par-dessus les poignets de la blouse



2c

- Puis attacher les cordons à la taille
- S'assurer d'être correctement couvert

\* IMPORTANT- Il existe plusieurs méthodes acceptables pour mettre l'équipement. Veuillez vérifier les protocoles suivis par votre établissement.

# Étapes à suivre pour retirer un équipement de protection (EPI)


**1**

## GANTS

- Enlever le premier gant en pinçant l'extérieur et tirer
- Glisser ensuite un doigt à l'intérieur du poignet de l'autre gant et tirer les gants ensemble à l'envers
- Jeter les gants


**2**

## MAINS

- Effectuer un lavage des mains si votre établissement le recommande


**4**

## MAINS

- Effectuer une bonne hygiène des mains


**5**

## VISIÈRE

- Retirer avec précaution en saisissant la sangle
- Jeter la visière


**3a**

## BLOUSE

- D'abord détacher le cou, puis la taille
- Retirer la blouse des épaules sans toucher l'extérieur de celle-ci


**6**

## MASQUE

- Retirer en tirant sur les élastiques, ne pas toucher le masque
- Jeter le masque


**3b**

- Rouler à l'envers pour former une boule


**7**

## MAINS

- Effectuer une bonne hygiène des mains


**3c**

- Placer dans le panier à linge

\*IMPORTANT- Il existe plusieurs méthodes acceptables pour retirer l'équipement. Veuillez vérifier les protocoles suivis par votre établissement.

[mipinc.com](http://mipinc.com)

